

IPS CaseDesigner®

Versiyon 2.6

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Hoş Geldiniz	3
Sorumluluk Reddi	3
Cihaz Tanımı	3
Kullanım Amacı	3
Amaçlanan Kullanım / Kullanım Endikasyonları	3
Amaçlanan Kullanıcı ve Amaçlanan Hasta Hedef Grubu	3
Diğer Cihazlarla Gerekli Uyumluluk	4
Ölçüm Fonksiyonlu Cihazlar	4
Siber Güvenlik	4
Bir Siber Güvenlik Olayı Durumunda Ne Yapmalısınız?	4
Kontrendikasyonlar	4
Uyumluluk	5
Birlikte Çalışabilirlik	5
Kullanım Süresi	5
Performans Gerekliklikleri ve Sınırlamalar	5
Klinik Faydaları ve İstenmeyen Yan Etkiler	5
Tesisler ve Eğitim	5
Ciddi Olaylarla İlgili Duyuru	5
Sistem Gerekliklikleri	5
Yazılım Kurulumu	5
Dikkat Edilecek Noktalar / Önlemler ve Uyarılar	6
Dikkat Edilecek Noktalar / Önlemler	6
Uyarılar	6
Sistem Gerekliklikleri	9
Kullanım Talimatları	10
Yazılım Kurulumu	10
Yazılımı Başlatma	10
IPS CaseDesigner İş Akışı Adımları	10
Bilinen Konular	11
Oklüzyon Hizalama Başarısız Olabilir	11
Seçenek 1 — Tekrar Tarama	11
Seçenek 2 — Dönüştürme	11

Hoş Geldiniz

Sorumluluk Reddi

Bu ürün genel bir konseptin parçasıdır ve Nobel Biocare'in talimatlarına ve tavsiyelerine göre yalnızca ilgili orijinal ürünlerle birlikte kullanılabilir. Nobel Biocare ürünleriyle bağlantılı olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılan ürünlerin tavsiye edilmeyen kullanımı, Nobel Biocare'in açık veya zımni her türlü garantisini veya diğer yükümlülüklerini geçersiz kılacaktır. Nobel Biocare ürünlerinin kullanıcısı herhangi bir ürünün belirli hasta ve koşullar için uygun olup olmadığını belirlemekle yükümlüdür. Nobel Biocare, Nobel Biocare ürünlerinin kullanımında profesyonel yargı veya uygulamadaki herhangi bir hatadan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, cezai veya diğer zararlardan açık veya zımni hiçbir sorumluluk kabul etmez ve hiçbir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı ayrıca bu Nobel Biocare ürünü ve uygulamaları ile ilgili en son gelişmeleri düzenli olarak incelemekle yükümlüdür. Şüphe durumunda, kullanıcı Nobel Biocare ile iletişime geçmelidir. Bu ürünün kullanımı kullanıcının kontrolünde olduğu için sorumluluk kullanıcıya aittir. Nobel Biocare, bundan kaynaklanan hasarlar için hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Lütfen bu Kullanım Kılavuzunda ayrıntıları verilen bazı ürünlerin tüm pazarlarda yasal düzenlemelerden geçemeyebileceğini, piyasaya sürülmeyebileceğini veya satış için lisans verilmeyebileceğini unutmayın.

Cihaz Tanımı

IPS CaseDesigner, kraniomaksillofasiyal ve ilgili tedavilerin teşhis sürecini ve tedavi planlamasını destekleyen bir yazılım çözümüdür.

IPS CaseDesigner, tanı bilgilerini görselleştirmek için belirli işlevlere sahiptir, örn. BT görüntülemeyi, tanı ve tedavi planlama sürecini desteklemek için görüntü verilerinde spesifik ölçümler yapmak ve cerrahi eylemleri planlamak.

IPS tasarım hizmeti, teşhis ve planlama verilerine dayanarak kişiselleştirilmiş cerrahi yardımlar sunabilir.

IPS CaseDesigner, kraniomaksillofasiyal ve ilgili tedavilerin teşhis sürecini ve tedavi planlamasını destekleyen bir kullanıcı arayüzüdür.

Kullanım Amacı

Yazılımın kullanım amacı, dental ve kraniomaksillofasiyal prosedürler için teşhis sürecini ve tedavi planlamasını desteklemektir.

Amaçlanan Kullanım / Kullanım Endikasyonları

IPS CaseDesigner, dental ve kraniomaksillofasiyal prosedürlerin teşhis ve tedavi planlama sürecini desteklemek için belirtilen bir yazılımdır. IPS CaseDesigner aynı zamanda bir görüntü segmentasyon sistemi olarak ve CT tarayıcı gibi bir tarayıcıdan görüntüleme bilgilerinin aktarımı için kullanılan bir yazılımdır.

IPS CaseDesigner ayrıca kişiselleştirilmiş cerrahi yardımların hizmet sunumunu da kolaylaştırır.

Amaçlanan Kullanıcı ve Amaçlanan Hasta Hedef Grubu

IPS CaseDesigner sadece mesleki kullanım içindir: Klinisyenler, hemşireler, dental teknisyenler ve bireysel cerrahi yardımcılarının tasarımcıları. Ürünün bir klinikte, özel ofiste, dental laboratuvarında veya cerrahi yardımcılar için bir tasarım servisinde bir yazılım aracı olarak kullanılması amaçlanmıştır.

Kraniomaksillofasiyal tedavisi görmesi gereken hastalara yöneliktir.

Diğer Cihazlarla Gerekli Uyumluluk

IPS CaseDesigner son çıkanlar dahil olmak üzere Windows ve Mac için en sık kullanılan işletim sistemleriyle uyumludur.

IPS CaseDesigner® içinde kullanılacak geçerli DICOM özellikleri şunlardır:

- En az iki dilim
- Dilimlerde görüntü oryantasyonu ve görüntü pozisyonu mevcut.
- Modalite (CB)CT şeklindedir.
- Görüntüler 2 bayt görüntülerdir.
- Görüntü oryantasyonu [1 0 0] [0 1 0] [0 0 1] şeklindedir.
- 'Standart' dilim artışından maksimum sapma 0,001 mm altındadır.
- Dilim kalınlığı 1,3 mm altındadır.

Ölçüm Fonksiyonlu Cihazlar

Ölçüm doğruluğu ve kesinliği voksel büyüklüğü 0,5 mm x 0,5 mm x 0,5 mm olacak şekilde tarayıcı ekipmanın kullanım kılavuzuna göre elde edilmiş BT taramalar girdisi (konik ışın) temelinde lineer ölçümler için 0,1 mm ve açı ölçümler için 0,1 derece şeklindedir.

IPS CaseDesigner yazılımı, kullanıcı tarafından seçilen noktalara dayalı olarak, ondalık noktadan sonra bir haneye yuvarlanan değeri raporlar.

Siber Güvenlik

Muayenehanenizi siber güvenlik tehditlerine karşı korumak, üretici olarak bizim ve sağlık hizmeti sağlayıcısı olarak sizin ortak sorumluluğumuzdur. Üretici, yazılımın bu tür tehditlere karşı korunmasını sağlamak için önlemler almıştır.

IPS CaseDesigner ürününün kullanılacağı bilgisayarda, etkin ve güncel antivirüs ve kötü

amaçlı yazılımdan koruma yazılımlarının, doğru yapılandırılmış bir güvenlik duvarı ile birlikte yüklenmesi önerilir. Aksi halde bu durum yetkisiz erişimlere yol açabilir.

Ayarlarda denetim günlüğünün etkinleştirilmesi ve bu günlüklerin yetkisiz erişime karşı korunmasının sağlanması önerilir. Aksi halde kötü amaçlı etkinlikler tespit edilemeyebilir.

Yazılıma erişim için iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın ve başında olmadığınızda bilgisayarınızı her zaman kilitleyin. Aksi halde bu durum yetkisiz erişimlere yol açabilir.

Ofis ağının yetkisiz erişime karşı korunduğundan ve ziyaretçi ağından ayrı olduğundan emin olun. Aksi halde bu durum yetkisiz erişimlere yol açabilir.

Beklenmeyen sistem arızalarından veya veri kaybına neden olabilecek kötü niyetli olaylardan hızlı bir şekilde kurtulmak için hasta verilerinin düzenli olarak yedeklenmesi önerilir.

IPS CaseDesigner uygulamasının yönetici ayrıcalıkları olmadan başlatılması önerilir. Aksi takdirde kötü amaçlı üçüncü taraf yürütülebilir dosyaları istenmeyen şekilde başlatılabilir.

IPS CaseDesigner uygulamasının her zaman en güncel yazılım versiyonuna güncellenmesi önerilir. Aksi halde bu durum yetkisiz erişimlere yol açabilir.

Kurulum sırasındaki yedeklemeler, güvenlik duvarı ve güvenlik ayarlarıyla ilgili daha fazla teknik ayrıntı için lütfen IPS CaseDesigner kurulum kılavuzuna bakın.

Bir Siber Güvenlik Olayı Durumunda Ne Yapmalısınız?

İzinsiz giriş veya kötü amaçlı yazılım nedeniyle olası bir sistem güvenliği ihlali durumunda kullanıcı, alışılmadık ürün davranışını ve/veya performans etkisini fark edebilir. Bu durumda kullanıcının derhal müşteri destek hizmetleriyle iletişime geçmesi önerilir.

Kontrendikasyonlar

IPS CaseDesigner için hiçbir tanımlanmadı.

Uyumluluk

IPS CaseDesigner diğer tıbbi cihazlarla bağlantılı değildir.

IPS CaseDesigner 'ın bu sürümü, IPS CaseDesigner 'ın önceki sürümleriyle uyumludur.

Birlikte Çalışabilirlik

Uyumlu değildir çünkü yazılım başka herhangi bir tıbbi cihazla veri alışverişi yapmıyor.

Kullanım Süresi

Yazılımın kullanım süresi üç yıldır. Desteklenen işletim sistemlerinde kullanıldığında, kullanım amacına göre çalışmaya devam edecektir.

Performans Gerekliklikleri ve Sınırlamalar

IPS CaseDesigner, birlikte kullanıldığı işletim sistemlerine bağımlıdır. Bu nedenle IPS CaseDesigner'ın yalnızca onaylanmış işletim sistemleriyle kullanıldığından emin olmak önemlidir. Hangi işletim sistemlerinin onaylandığı hakkında daha fazla bilgi IPS CaseDesigner için Bilgisayar Yönergeleri içinde bulunabilir.

Klinik Faydaları ve İstenmeyen Yan Etkiler

IPS CaseDesigner, kraniomaksillofasial cerrahinin bir bileşenidir. Klinisyenler, yazılımın teşhis ve tedavi planlama sürecini desteklemesini bekleyebilir.

Bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Tesisler ve Eğitim

İmplantların, protezlerin ve ilgili yazılımların yeni ve deneyimli kullanıcılarının yanı sıra klinisyenlerin, yeni bir tedavi yöntemine başlamadan önce daima özel eğitimden geçmeleri şiddetle tavsiye edilir. Destek ekibi tarafından çeşitli bilgi ve deneyim seviyeleri için çok çeşitli kurslar sunulabilir.

Ciddi Olaylarla İlgili Duyuru

Bu cihazın kullanımı sırasında veya kullanımının bir sonucu olarak ciddi bir olay oluştuysa lütfen üreticiye ve ulusal makama bildirin. Ciddi bir olayı bildirmek için bu cihazın üreticisinin irtibat bilgileri şöyledir:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Sistem Gerekliklikleri

Yazılımın kurulumuna başlamadan önce minimum ve/veya önerilen gerekliklikler hakkında bilgi edinmek için Sistem Gereklikliklerinin kontrol edilmesini öneririz. Yazılımın daha yeni versiyonları donanım veya işletim sistemi açısından daha yüksek gereklikliklere sahip olabilir.

Yazılım Kurulumu

Yazılımın kurulmasıyla ilgili bilgiler IPS Case Designer Kurulum Kılavuzu içinde bulunabilir. Bu belge Kullanıcı Dokümantasyonu Kütüphanesinden (ifu.dtxstudio.com) indirilebilir. Herhangi bir sorun olursa veya yardım gerekirse lütfen yetkili bir teknisyen veya müşteri desteği (support@dtxstudio.com) ile irtibat kurun.

Dikkat Edilecek Noktalar / Önlemler ve Uyarılar

Dikkat Edilecek Noktalar / Önlemler



Yeni bir cihaz veya tedavi yöntemini ilk kez kullanırken yeni cihaz veya tedavi yöntemi konusunda deneyimli bir meslektaşla çalışmak olası komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Yazılım hakkında yetersiz bilgi ve yazılım özelliklerinin iyi anlaşılması, istenmeyen sonuçlara yol açabilir: Bir tedavinin gecikmesine veya tekrar planlanmasına neden olabilir ve yanlış osteosentezle sonuçlanabilir.

Yazılımda sağlanan teşhis ve cerrahi araçlarını kullanırken şunlara özellikle dikkat etmek gerekir:

- endikasyonların doğruluğu (ölçümler, kritik fonksiyonlar veya yapılar ve dosyadaki endikasyonlar).
- oluşturulan ateller ve geliştirilen plana göre hastanın ağızına optimum şekilde oturmaları.
- kullanılan tarayıcılar ve dental döküm için kullanılan materyal (bunları değiştirmek hatalı bir varsayılan dental tarama eşiğiyle sonuçlanabilir)

Bunun yapılmaması, cerrahi planının revize edilmesi ihtiyacının ortaya çıkma riskini artırır. Bu da sırasıyla tedavide gecikmeye veya tedavinin tarihinin yeniden planlanmasına yol açabilir. Hatta yanlış osteosentezle bile sonuçlanabilir.

Yazılım versiyonunu güncelledikten sonra yeni yazılım versiyonunda bu ayarların doğru olduğundan emin olmak üzere açık hasta vakaları ve/veya cerrahi planların kritik ayarlarını doğrulamak önerilir. Yanlış ayarlar yanlış osteosentezle sonuçlanabilir.

Yazılımın bu uyarı sinyallerine uymamak, yanlış osteosenteze neden olabilir.

DICOM verilerini yüklerken özellikle dikkatli olunması önerilir. Yanlış ve eksik veriler yanlış osteosentezle sonuçlanabilir.

IPS CaseDesigner'in kullanılacağı bilgisayarda, etkin ve güncel anti-virüs ve kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımlarının, doğru yapılandırılmış bir güvenlik duvarı ile birlikte yüklenmesi önerilir. Ayrıca, tek bırakıldığında bilgisayarınızı her zaman kilitleyin. Bunu yapmamak, planın veya tedavinin istenmeyen şekilde ele alınmasına yol açabilir.

Uyarılar

IPS CaseDesigner'da bir dizi teknik uyarı (örn. tutarsız CT verileri, bozuk STL verileri) görselleştirilir.

Bir uyarı paneli, modellerin oluşturulması, teşhis veya osteotomi simülasyonları sırasında aşağıdaki uyarılardan bir veya daha fazlasını gösterebilir.



Üst çenenin yanlış hizalanması tespit edildi.

Yanlış cerrahi planlama riskini azaltmak için üst çenenin doğru hizalanmasını sağlamak için **Manuel başlatma** eylemini kullanın.

Alt çenenin yanlış hizalanması tespit edildi.

Yanlış cerrahi planlama riskini azaltmak için alt çenenin doğru hizalanmasını sağlamak için **Manuel başlatma** eylemini kullanın.

Her iki çenenin yanlış hizalanması tespit edildi.

Yanlış cerrahi planlama riskini azaltmak için çenelerin doğru hizalanmasını sağlamak için **Manuel başlatma** eylemini kullanın.

Her iki çeneyi ayırmak için sert ayırma kullanıldı.

Ameliyat planında eksik (planlama) bilgi kullanma riskini azaltmak için, sert ayırma kullanmak istemiyorsanız **Uzman ayarlarını** fossa-kondil ayırımı için ayarlayın.

Yanlış çene ayırımı tespit edildi.

Doğru bir çene ayırımı elde etmek ve yanlış cerrahi planlama riskini azaltmak için **Uzman ayarlarını** fossa-kondil ayırımı için ayarlayın.



Üst çene manuel olarak başlatılır.

Üst çenenin hizalama hesaplaması, **Manuel başlatma** eyleminde yer alan ilgili noktalar tarafından başlatılır. Yanlış cerrahi planlama riskini azaltmak için cerrahi planı tamamlamadan önce çene hizasının doğru olduğundan emin olun.

Alt çene manuel olarak başlatılır.

Alt çenenin hizalama hesaplaması, **Manuel başlatma** eyleminde yer alan ilgili noktalar tarafından başlatılır. Yanlış cerrahi planlama riskini azaltmak için cerrahi planı tamamlamadan önce çene hizasının doğru olduğundan emin olun.

Her iki çene de manuel olarak başlatıldı.

Her iki çenenin hizalama hesaplaması, **Manuel başlatma** eyleminde yer alan ilgili noktalar tarafından başlatılır. Yanlış cerrahi planlama riskini azaltmak için cerrahi planı tamamlamadan önce çene hizasının doğru olduğundan emin olun.

DICOM veri seti dilim kalınlığı çok büyük.

Önerilen tarama protokolüne göre geçerli DICOM dosyalarının nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi için lütfen yardım dosyalarına bakın.

DICOM veri setinde tutarsız dilim artışları var.

Önerilen tarama protokolüne göre geçerli DICOM dosyalarının nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi için lütfen yardım dosyalarına bakın.

DICOM veri seti dilim artışı çok büyük.

Önerilen tarama protokolüne göre geçerli DICOM dosyalarının nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi için lütfen yardım dosyalarına bakın.

Bozuk dosya

[“üst tarama”, “alt tarama”, “oklüzyon taraması”] dosyası açılmadı, lütfen başka bir dosya seçin. Sorun devam ederse, müşteri desteği ile iletişime geçin.

Bozuk dosyalar

Her iki dosya da açılmadı, lütfen diğer dosyaları seçin. Sorun devam ederse, müşteri desteği ile iletişime geçin.

DICOM dosyasındaki adı hasta adından farklıdır.

Hasta modelini oluşturma da yanlış veri kullanma riskini azaltmak için hasta adını doğrulayın ve hasta adı ile kullanılan DICOM veri setindeki adın uyuşup uyuşmadığını kontrol edin.

Mevcut cerrahi plan için ateli sonlandırın.

Oluşturulan atel dosyaları sadece planlanan ameliyat için geçerlidir. Cerrahi planı değiştirmek istiyorsanız, ateli çıkarmak ve değişiklik yapmak için kilit açma eylemini kullanın.

Yerel olarak üretilen cerrahi atellerin, üreticinin kullanım kılavuzlarına göre onaylanmış işlemler ve uygun malzemeler kullanılarak üretilmesi gerektiğini unutmayın. Optimal uyum ameliyattan önce doğrulanmalıdır.

Kesişen modeller algılandı. Otorotasyon değerini artırın.

Cerrahi uyumsuzluk riskini azaltmak için otorotasyon değerini artırın.



Kesişen modeller algılandı.

Modellerin kesişmesini önlemek için otomatik döndürmeyi ayarlayın. Ateli oluşturmaya devam etmek istiyorsanız Devam'a basın.

Fragmanlar kesişiyor olabilir.

Sanal Oklüzyon sihirbazında üst ve alt çene kesiştiğinde, son oklüzal pozisyonu elde edebilmek için bölgeyi öğütmek gerekecektir.

Ameliyat öncesi pozisyon için cerrahi atel.

Hastanın ameliyat öncesi pozisyonu için atel oluşturulacağını unutmayın.

Otomatik mandibular sınırları doğrulayın

Yaralanmayı/hasarı engellemek için otomatik sınır kanalının eksiksiz ve doğru açıklamalarının mevcut olduğundan emin olun. Yanlış ise, otomatik mandibular sınırları lütfen silin ve manuel olarak belirtin.

Cerrahi planını içe aktardıktan sonra lütfen içe aktarılan osteotomileri, hareketleri ve oklüzyonu doğrulayın. Gerekliyse planınıza devam etmeden önce bunları ayarlayın.

Cerrahi planını içe aktardıktan sonra lütfen içe aktarılan osteotomileri, hareketleri ve oklüzyonu doğrulayın. Gerekliyse planınıza devam etmeden önce bunları ayarlayın.

Sistem Gereklilikleri

İşletim Sistemi¹	Masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar için Windows® 11 veya 10 64-bit (Pro ve Enterprise sürümü). iMac, Mac Mini, Mac Pro, MacBook Pro, MacBook Air cihazlar için macOS Sequoia (15), Sonoma (14) veya Ventura (13) (Intel tabanlı Mac ve Apple Silicon Mac, M1 veya üzeri çipli). ²
CPU	Çift çekirdekli (3 Ghz)
RAM	8 GB
Grafik kartı	Optimum 3D desteği (OpenGL® 3.3) ³ ve 2 GB veya üstü kart üstü belleğe sahip bölünmemiş grafik kartı (AMD veya NVIDIA gibi). 4K ekranlar için 4 GB veya üstü. Düşük GPU'lar kullanırken sorun yaşarsanız görüntüleme ayarında 3D aydınlatma için planlama modunu seçmeyi düşünün. Bazı MacBook Air® ve Mac mini® konfigürasyonlarında grafik kartında 3D rendering açısından sınırlamalar vardır. Sorun yaşarsanız görüntüleme ayarında 3D aydınlatma için planlama modunu seçmeyi düşünün.
Disk alanı	5 GB boş disk alanı
Ağ	3 Mbps yükleme ve 30 Mbps indirme hızıyla geniş bant İnternet bağlantısı. Her zaman internete bağlı olması önerilir. Bu mümkün değilse en az 14 günde bir bağlantı kurulmalıdır, aksi takdirde IPS CaseDesigner'a erişiminiz geçici olarak askıya alınabilir. İnternet bağlantısı yeniden kurulduğunda IPS CaseDesigner'a erişiminiz yeniden sağlanacaktır.
Monitör	Full HD (1920×1080) veya üstü.

1 İşletim Sistemi (İS) versiyonunuzun mevcut en son güncellemesini yüklemeniz önemle tavsiye edilir; çünkü bu, bilinen hataları veya güvenlik açıklarını düzelterek kullanıcıları ve bilgisayar sistemlerini daha güvenli hale getirecektir.

2 MacBook Air® ve Mac® Mini konfigürasyonları en az Intel HD 5000 / Iris grafik kartı gerektirir.

3 Grafik kartınızın OpenGL® versiyonunu kontrol etmek için şu adrese gidin: <http://realtech-vr.com/admin/glview>.

Kullanım Talimatları

Yazılımın nasıl kullanılması gerektiği hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen IPS CaseDesigner yazılımı aracılığıyla erişilebilen yardım dosyalarındaki ayrıntılı talimatlara bakın.

Yazılım Kurulumu

Yazılımın kurulumuna başlamadan önce IPS CaseDesigner bilgisayar gereksinimlerini kontrol edin.

Yazılımı IPS CaseDesigner Kurulum Kılavuzuna göre kurun.

Yazılımı Başlatma

Uygulamayı açmak için masaüstündeki IPS CaseDesigner kısayol simgesine çift tıklayın. Yazılım açılır ve hasta dosyalarıyla çalışmaya başlamanıza olanak tanır.

IPS CaseDesigner İş Akışı Adımları

Hasta, IPS CaseDesigner için tanımlanan tarama protokollerine göre bir taramaya tabi tutulur. Modeller son oklüzyonda taranır. Dental dökümün her iki parçası da ayrı ayrı, ancak bir DICOM veri seti içinde taranır. Ortaya çıkan DICOM dosyaları hasta modeli, ameliyat modelleri, oklüzyon modelleri ve cilt oluşturmak için kullanılır.

Kullanıcının mandibular siniri göstermesi veya mesafeleri, açıları veya değerleri ölçmesi için teşhis araçları mevcuttur. Bir sefalometrik çerçeve, kullanıcının sefalometrik analizde kullanılacak yer işaretlerini belirtmesine izin verir.

Ameliyat araçları ile sanal model, Le Fort I, sagittal split, ramus, segmental ve çene osteotomileri dahil olmak üzere farklı osteotomi tiplerine göre osteotomiye tabi tutulabilir. Farklı kemik bölümlerinin hareketleri simüle edilebilir. Ameliyatta kullanılacak plakları seçmek için cerrahi atel dosyası oluşturulabilir ve osteosentez plaklarının listesine bakılabilir.

Yazılımın nasıl kullanılması gerektiği hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen IPS CaseDesigner yazılımı aracılığıyla erişilebilen yardım dosyalarındaki ayrıntılı talimatlara bakın.

Kullanım Talimatlarının basılı bir kopyasına sahip olmak istiyorsanız, lütfen müşteri desteği ile iletişime geçin.

Bilinen Konular

Oklüzyon Hizalama Başarısız Olabilir

Yüksek parazit seviyeleri olan oklüzyon DICOM verileri kullanılırken oklüzyon hizalama adımı başarısız olabilir.

Seçenek 1 — Tekrar Tarama

1. Yardım dosyası ek 2 içinde tanımlanan oklüzyon tarama protokolüne göre son oklüzyonun tekrar bir taramasını elde edin.
2. Yeni oklüzyon DICOM verileriyle oklüzyon hizalama adımını tekrarlayın.

Seçenek 2 — Dönüştürme

1. Parazitli oklüzyon DICOM verilerini oklüzyon modelinin bir STL dosyasına dönüştürün.
2. Oklüzyon modelini kullanarak oklüzyon hizalama adımını tekrarlayın.

SUPERSEDED




Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
İsveç

www.nobelbiocare.com

Avustralya Distribütörü:

Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114
Avustralya

Telefon: +61 1800 804 597

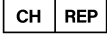

İsviçre ithalatçısı/temsilcisi:

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
İsviçre

Yeni Zelanda Distribütörü:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
Yeni Zelanda
Telefon: +64 0800 441 657

Türkiye Distribütörü:

OYPA MEDİKAL GIDA SAN VE TIC.LTD.ŞTİ
İdealtepe Mah.Dik sok.Eko Plaza No: 1 D: 3 Kat: 2
34841 Maltepe – İstanbul / TÜRKİYE
www.oypamedical.com
www.oypalife.net

Phone: +90 216 403 1301



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com